


Check One DIGITAL

チェックワン®デジタル デジタル表示の妊娠検査薬

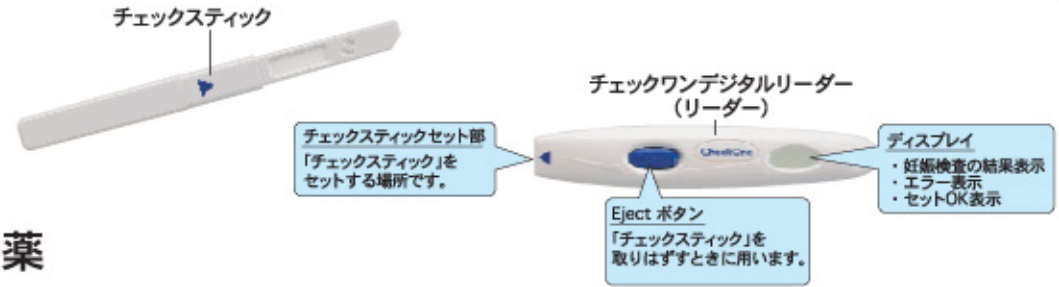

【検査のしかた】 検査は下記の手順に従って正しく行ってください

★ チェックワンデジタルは、検査直前に「チェックスティック」を「リーダー」にセットして使います。

・「チェックスティック」は、必ず同じ箱に入っている「リーダー」とともに使用してください。
 ・他の箱の「チェックスティック」は使用できません。
 ＊この「リーダー」で使用できる「チェックスティック」の詰め替え品(レフィル)は販売していません。

1 検査の準備 図1

朝・昼・夜いつの尿でも検査可能です。

★検査直前にアルミ袋から「チェックスティック」を取り出し、キャップをはずしてください。

2 検査キットの組み立て 図2

★「チェックスティック」と「リーダー」上の青色の三角矢印をさがします。青色の三角矢印を一直線上に並べます。

★「チェックスティック」を「リーダー」に「カチッ」と音がするところまでセットします。「セットOK表示」を確認したらすぐに検査します。

＊「セットOK表示」が表示されるまで、検査しないでください。
 ＊「セットOK表示」が表示されない場合は、Eject ボタンを押して「チェックスティック」を取り出し、もう一度セットしてください。それでもまだ「セットOK表示」が表示されない場合は、＜エラー表示一覧＞【D】をご覧ください。
 ＊セット完了後は、検査結果が表示されるまで Eject ボタンを押さないでください。(エラー表示があらわれた場合を除く)

3 検査する 図3

5～7 秒間

尿をかける

尿吸収体

★「リーダー」を下に向け、「チェックスティック」の尿吸収体全体に直接尿を5～7秒間かけてください。

・このとき、「リーダー」を濡らさないように気をつけてください。

又は

15 秒間

尿につける

尿吸収体

★紙コップ等を使用する場合は、乾いた清潔なものを用い、尿吸収体全体が浸るように15秒間尿につけてください。

4

待つ(検査中)

図4



★かけ終わったらキャップをして尿吸収体を下に向けて持つか、水平なところに置いてください。20~30秒後に「セットOK表示」が点滅し始め、「検査中」であることを知らせます。

- * +、-の結果が表示されるまで Eject ボタンを押さないでください。
- * 「セットOK表示」が点滅しなかった場合は、<エラー表示一覧>【B】をご覧ください。

5

結果をみる

★1~3分でディスプレイに判定結果が表示されます。

- * 判定結果は1時間ディスプレイ表示されます。
- * 結果が表示されたら Eject ボタンを押して、「チェックスティック」を取りはずしていただいてもかまいません。

【判定のしかた】ディスプレイの表示を見て判定してください

⊕ が表示された場合

図5-1

陽性



妊娠反応が認められました。

妊娠している可能性があります。できるだけ早く医師の診断を受けてください。

⊖ が表示された場合

図5-2

陰性



今回の検査では妊娠反応は認められませんでした。

しかし、その後生理が始まらない場合は、再検査をするか、または医師に相談してください。

- 判定結果は1時間ディスプレイに表示されます。
- 結果が表示されたら、Eject ボタンを押して「チェックスティック」を取りはずしていただいてもかまいません。
- 「リーダー」のディスプレイにあらわれた表示を見て判定し、「チェックスティック」にあらわれた線で判定しないでください。
- 使用済みの「チェックスティック」を再度差し込まないでください。
- エラー表示が表示されている場合は、<エラー表示一覧>をご覧ください。


<続けて再検査をするには>

- 「リーダー」のディスプレイに結果が表示されている、またはエラー表示が表示されているときは続けて検査できません。
- 判定結果は1時間、エラー表示は30分間表示されます。
- 続けて再検査をする前に、多量の水分を摂らないでください。
- デジタル表示がすべて消えて「リーダー」が使えるようになったら、新しい「チェックスティック」を使って、もう一度【検査のしかた】②検査の準備から操作を行ってください。


<エラー表示一覧>



「チェックスティック」をはずすのが早すぎたことが考えられます。すぐに「チェックスティック」を「リーダー」にセットし直してください。再度失敗するとエラー表示【B】があらわれます。

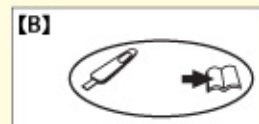

検査が正しく行われていないことをあらわしています。次の原因が考えられます。
・「チェックスティック」を「リーダー」に確実にセットする前に尿をかけてしまったため
・尿をかけ終わった後に尿吸収体を下に向けて持たなかったか、水平に置かなかったため
・尿のかけすぎか尿量不足のため
・「チェックスティック」をはずすのが早すぎたため
このエラー表示は30分間表示されます。同じ箱内に未使用の「チェックスティック」がありましたら、説明書に従い検査をやり直してください。<続けて再検査をするには>をご覧ください。

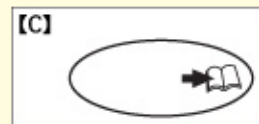

「リーダー」にエラーが発生しています。同じ箱内に未使用の「チェックスティック」があってもこの「リーダー」は使用しないでください。アラクスチェックワン相談室までお問い合わせください。



ディスプレイに何も表示があらわれない場合
まだ尿をかける前でしたらもう一度「チェックスティック」をはずして【検査のしかた】②検査キットの組み立てから始めてください。それでもディスプレイに表示があらわれない場合は、アラクスチェックワン相談室までお問い合わせください。

チェックワンデジタルの検査に関するお問い合わせ

アラクスチェックワン相談室 TEL052(951)2503
名古屋市中区丸の内三丁目2-26 〒460-0002
受付:月~金曜(祝日を除く)9:00~16:30

ARAX 株式会社 アラクス
〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目2-26